

C€0197

- a. Betätigen Sie bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig **START** und die **M-Taste**, um zum **Datum-** und **Zeiteinstellung** zu gelangen. Es blinkt nun der **Eingabepfeil** für den **Monat**. 
- b. Um die **Zahl** für den **Monat** einzugeben, drücken Sie die **M-Taste** so oft, bis die gewünschte **Monatszahl** erscheint.
- c. Drücken Sie nun noch einmal **START** zur **Bestätigung**. Nun blinkt der **Eingabepfeil** für das **Datum**.
- d. Zur **Einstellung** des **Tages**, der **Stunde** und der **Minute** gehen Sie genauso vor, wie bei **a** und **b** beschrieben.
- e. Drücken Sie jeweils zur **Auswahl** die **M-Taste** und zur **Bestätigung** der **Eingabe** **START**.
- f. **Datum** und **Uhrzeit** werden permanent angezeigt, bei einem **Batteriewechsel** gehen beide **Einheiten** verloren.



d. Ihr systolischer und diastolischer Blutdruck sowie der Puls-Wert werden angesagt und erscheinen im Display. Entsprechend der Blutdruckklassifikation nach der WHO blinkt der Blutdruck-Indikator neben dem dazugehörigen farbigen Balken und das Gerät teilt Ihnen dies per Sprach mit.

e. Die gemessenen Werte werden automatisch gespeichert. Im Speicher können für 2 Benutzer je bis zu 60 Messwerte mit Uhrzeit und Datum gespeichert werden.



a. Sprache einstellen (D, GB, F, E, I, NL) :
Betätigen Sie bei ausgeschaltetem Gerät die M-Taste und halten diese gedrückt um die gewünschte Sprache auszuwählen. Die verschiedenen Sprachen werden nun angezeigt und angezeigt (I, I, L, L...). Sprache aus wird durch einen Ton signalisiert (Anzeige: L0). Durch Loslassen der M-Taste wird die angesagte Sprache ausgewählt.

b. Lautstärke einstellen:
Betätigen Sie bei ausgeschaltetem Gerät die M-Taste und halten diese gedrückt, bis die aktuell programmierte Sprache angezeigt/angesagt wird. Nun die M-Taste loslassen und erneut gedrückt halten bis Sie die von Ihnen gewünschte Lautstärke hören.



Bereich der Blutdruckwerte	Systole (in mmHg)	Diastole (in mmHg)	Maßnahme
Stufe 3: starke Hypertonie	≥ 180	≥ 110	einen Arzt aufsuchen
Stufe 2: mittlere Hypertonie	160–179	100–109	einen Arzt aufsuchen
Stufe 1: leichte Hypertonie	140–159	90–99	regelmäßige Kontrolle beim Arzt
Hoch normal	130–139	85–89	regelmäßige Kontrolle beim Arzt
Normal	120–129	80–84	Selbstkontrolle
Optimal	< 120	< 80	Selbstkontrolle

8:39 10-20

128

128

78

65

SYSTOLE

DIASTOLE

PULS

Arrhythmie Zeichen

Batterie schwach

Luftleakage

Aufpumpen

Anschlüsse für Luftschlauch

LCD

FARBIGE FLUTRUCK-RECHNER MACTRAK 5

Stecken Sie das Luftschlauchende der Manschette in die Öffnung des Gerätes auf der linken Seite.

Schieben Sie die Manschette über den linken Oberarm und platzieren Sie den Luftschlauch auf der Armmitte. Der Abstand von der Manschette zur Ellenbeuge sollte 1–2 cm betragen. Beachten Sie, dass die Manschette fest anliegt, den Arm aber nicht einschnürt.



Reinigung: Wenn die Manschette schmutzig ist, lösen Sie diese vom Gerät und waschen sie von Hand mit kaltem Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Bürsten. An der Luft trocknen lassen, nicht bügeln!

Ihr Blutdruckmessgerät speichert automatisch bis zu 2 x 60 Messungen von Blutdruck und Puls mit Uhrzeit und Datum. Zum Abrufen der gespeicherten Messwerte drücken Sie die **M-Taste**, zunächst wird der Durchschnittswert der letzten 3 Messungen angezeigt. Weitere Betätigung der **M-Taste** führt Sie zu den zuvor gespeicherten Messwerten mit Zeit und Datum.

Um von Benutzer 1 zu 2 und umgekehrt zu wechseln, drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die **START-Taste** oder die **M-Taste** und bei Signalton, die jeweils andere Taste. Auf dem Display wird Benutzer 1 (U1) bzw. 2 (U2) angezeigt.



- Name und Modell: MedTask DELUXE
- Geräteklassifikation: Typ BF
- Abmessungen: ca. 15 x 12 x 6,5cm
- Manschette: 22 - 30 cm
- Gewicht: ca. 345 g (ohne Batterien)
- Messmethode: Oszilometrisch
- Druckerzeugung/Ablass: Automatisch
- Speicherplätze: 2 x 60 mit Datum und Uhrzeit
- Stromversorgung: 4 x 1,5 V Batterie AA LR06
- Blutdruck Messbereich: 0 – 300 mmHg
- Maximale Abweichung des statischen Drucks: ± 3 mmHg
- Maximale Abweichung der Pulswerte: ± 5 %
- Messbereich Puls: 30 – 180 Schläge/min
- Betriebsbedingungen: +5 °C bis +40 °C
- Automatische Abschaltung: Nach 1 Minute

Entspannen Sie Ihren Arm und legen ihn locker mit der Handfläche nach oben auf den Tisch. Die Manschette sollte während der Blutdruckmessung auf Herzhöhe gehalten werden.



Legen Sie sich mit und bleiben 5 Minuten ruhig liegen, entspannen Sie Ihren Arm und legen ihn locker ausgestreckt mit der Handfläche nach oben neben sich. Die Manschette sollte während der Blutdruckmessung auf Herzhöhe sein.



Verhalten Sie sich ruhig: Bewegen Sie sich nicht und sprechen Sie nicht, um korrekte Messergebnisse zu erzielen. Halten Sie zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messungen einen Zeitabstand von mindestens drei Minuten ein. Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet.



Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches und setzen unter Beachtung der Polarität, 4 Batterien 1,5V Typ AA LR06 ein und schließen es wieder. Wechseln Sie die Batterien aus, wenn Sie das Gerät per Sprache dazu auffordert, das Batterie-Symbol im Display erscheint oder das Display nichts anzeigt, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde.



SICHERHEITSHINWEISE: Batterien von Kindern fernhalten, nicht ins Feuer werfen! Werfen Sie verbrauchte Batterien und Elektrogeräte nicht in den Hausmüll, sondern nutzen Sie die Entsorgung in einer Sammelstelle.

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die START-Taste drücken.
- Wird die START-Taste gedrückt, ist ein Ton gefolgt von der Sprachanweisung zu hören und es erscheinen alle Zeichen im Display. Anschließend werden die Werte der letzten Messung angezeigt.



Drücken Sie die M-Taste, drücken und halten Sie nun die M-Taste erneut für ca. 3 Sekunden, sie hören ein akustisches Signal und alle gespeicherten Messwerte werden automatisch gelöscht.



Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltung. Wird keine Taste gedrückt, schaltet sich das Gerät nach einer Minute automatisch ab. Das Gerät kann auch mit der **START**-Taste ausgeschaltet werden.



- a. Die Manschette ist nicht korrekt oder zu locker angelegt.
- b. Inkorrekte Messposition oder der Nutzer spricht oder bewegt sich während der Messung.
- c. Beim Aufpumpen oder während des Messvorgangs ist eine Störung aufgetreten. Wiederholen Sie die Messung.
- d. Bei leicht unregelmäßigem Puls wiederholen Sie die Messung. Für Patienten mit stark unregelmäßigem Puls ist das Gerät nicht geeignet.

EC	REP
----	-----

 Lotus Global Co., Ltd.
 1 Four Seasons Terrace West Drayton, Middlesex, London, UB7 9GG, United Kingdom
 Tel: +0044-20-75868010 Fax: +0044-20-79006187

Das <u>Blutdruckmessgerät</u> ist für den Einsatz in einer unter angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Anwender des Blutdruck-Messgeräts hat sich zu versichern, dass das Gerät in einer solchen Umgebung benutzt wird.		
Aussendungs-Messungen	Übereinstimmung	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
HF-Aussendungen nach CISPR 11	Gruppe 1	Das „ <u>Blutdruckmessgerät</u> “ verwendet HF-Energie ausschließlich zu seiner Information. Daher ist seine elektromagnetische Emission sehr gering und ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden.
HF-Aussendungen nach CISPR 11	Kategorie B	Das „ <u>Blutdruckmessgerät</u> “ ist bestimmt für den Einsatz in allen Einrichtungen, einschließlich Wohnbereichen und solchen Bereichen, die unmittelbar benachbart zu öffentlichen Niederspannungsnetzen sind. Es ist nicht geschlossen sind, das auch Blockade verursacht, die für die Messung gestört werden.
Überschneidungen nach IEC 61000-3-2	nicht zutreffend	
Spannungsschwankungen und Flicker nach IEC 61000-3-3	nicht zutreffend	

Das Blutdruckmessgerät ist für den Einsatz in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Blutdruckmessgeräts sollte sichstellen, dass das Messgerät in einer solchen Umgebung benutzt werden kann.			
Störfestigkeits-Prüfungen	IEC 60601-1 Prüfgröße	Übereinstimmungs-Pegel	Elektromagnetische Um- gebung – Verlassen
Einführung statischer Elektrizität (ESD) nach IEC 61000-4-2	1 kV Kontakt- erfassung 1 kV Luft- erfassung	1 kV Kontakt- erfassung 1 kV Luft- erfassung	Fußböden bestehen aus Holz oder Beton bestehen oder mit Keramikfliesen versehen sein. Handelt es sich bei dem Fußboden um ein synthetisches Material, muss die relative Luftfeuchte mindestens 30% betragen.
Magnetfeld bei der Versorgungs-frequenz (50 Hz) nach IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetfelder der Netzfrequenz müssen die Stärke aufweisen, die dem Standort in einer typischen gewerblichen oder Krankenhausumgebung entsprechen.

Das Blutdruckmessgerät ist für den Einsatz in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Blutdruckmessgeräts sollte sicherstellen, dass das Gerät in einer solchen Umgebung benutzt wird.								
Bestrahlung durch Funkwellen Profilierung	IEC 60601-1 Gruppen B	Störstrahlung Störleistung Frequenz Bänder						
Bei der Verwendung von tragbaren und mobilen Hochfrequenz-Kommunikationsgeräten durch der empfindliche Abstrahlung zu jedem Teil des Blutdruckmessgeräts (einschließlich der Kabeln), der anhand der auf die Frequenz des Senders anfallenden Gleichung berechnet wurde, nicht unterschritten werden.								
Empfohlener Schutzabstand: <table> <tr> <td>HF-Ges. großen Bereich 81000-4-3</td><td>3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz</td><td>3 V/m</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td> HF-2 80 MHz bis 800 MHz HF-3 800 MHz bis 2,5 GHz </td></tr> </table>			HF-Ges. großen Bereich 81000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	3 V/m			HF-2 80 MHz bis 800 MHz HF-3 800 MHz bis 2,5 GHz
HF-Ges. großen Bereich 81000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	3 V/m						
		HF-2 80 MHz bis 800 MHz HF-3 800 MHz bis 2,5 GHz						

[illegible]

 Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät am Ende der Lebenszeit umweltgerecht entsprechend der Elektroaltgeräte-Richtlinie. – WEEE (Waster electrical and Electronic Equipment)

Das Produkt enthält 4 Alkalische Batterien AA. Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit enthalten. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (= Batterie enthält Blei) gekennzeichnet.

CE0197

Hersteller: Andon Health Co. Ltd.
No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China